

Sani-Cloth® CHG 2%

Desinfectante de conectores y puertos de catéter

Desinfección de productos sanitarios. Eficaz en la desinfección de los componentes externos de catéteres venosos (centrales y periféricos), tales como conectores sin agujas, puertos de acceso y tubos de recogida de muestras.

Marcado CE según el RD 1591/2009 y la Directiva Europea 93/42/CEE que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en **P.S. Clase IIa**.

> Composición

En 100g Digluconato de Clorhexidina, Ácido D-glucónico, (2g). Alcohol isopropílico 70% (62g). Agua purificada y excipientes (hasta 100g).

> Eficacia garantizada

Acción biocida contra bacterias, hongos, levaduras y virus con tiempo de contacto variables según los diferentes microorganismos.

> Aplicaciones

Desinfección de productos sanitarios no invasivos tales como accesos vasculares, catéteres venosos (centrales y periféricos) y arteriales, conectores sin aguja y botellas de hemocultivo.

> Actividad

BACTERIA-FASE II PARTE I

EN 1276	
Pseudomonas aeruginosa	1 min (c+d)
Escherichia coli	1 min (c+d)
Enterococcus hirae	1 min (c+d)
Staphylococcus aureus	1 min (c+d)

EN 13727	
Pseudomonas aeruginosa	1 min (c+d)
Staphylococcus aureus	1 min (c+d)
Enterococcus hirae	1 min (c+d)

BACTERIA-FASE II PARTE II

Test de superficie DGHM - Higiene Norte	
Pseudomonas aeruginosa	1 min (c+d)
Staphylococcus aureus	1 min (c+d)
Enterococcus hirae	1 min (c+d)
Proteus mirabilis	1 min (c+d)
Escherichia coli	1 min (c+d)

LEVADURA-FASE II PARTE I

EN 13624	
Candida albicans	1min (c+d)

LEVADURA-FASE II PARTE II

Test de superficie DGHM - Higiene Norte	
Candida albicans	1 min (c+d)

HONGOS-FASE II PARTE I

EN 13624	
Candida albicans	1 min (c+d)

VIRUS CON ENVOLTURA-FASE II PARTE I DW/RKI

Hepatitis B	15 s (c+d)
Hepatitis C	15 s (c+d)
Bovine viral diarrhoea virus (utilizado como sustituto del virus Hepatitis C)	15 s (c+d)
Vaccinia virus-Strain Elstree	15 s (c+d)
HIV	15 s (c+d)

TB-FASE II PARTE I

EN 14348	
Mycobacterium terrae	1 min (c+d)

TB-FASE II PARTE II

Test de suspensión DGHM - Higiene Norte (equivalente a EN 14563)	
Mycobacterium terrae	1 min (c+d)

> Referencia

Tamaño toallitas	Contenido	Referencia	Embalaje
150 x 129mm	100 UI	151932	12 cajas



Cumple con la guía EPIC 3 y NICE para la desinfección de conexiones y puertos de catéteres

Toallitas testadas dermatológicamente

Toallitas desinfectantes envasadas de forma individual de un solo uso listas para usar

Proporciona una rápida acción antimicrobiana y una excelente actividad residual

