

Novamed[®] Surface

Bimedica.

Desinfectante de superficies con base alcohólica para **Productos Sanitarios no invasivos**. De acción rápida y seca sin dejar residuos. No contiene aldehídos, fragancias ni colorantes, y es adecuado para todas las superficies resistentes al alcohol.

Bactericida (EN 13727), fungicida (EN 13624), micobactericida (EN 14348) y virucida (EN 14476).

ÁREAS DE USO

Novamed[®] Surface Solución es de uso generalizado en todo el hospital

MODO DE EMPLEO

Utilizar con pulverizador manual

- ✓ Pulverizar una película uniforme sobre las superficies de productos sanitarios que se quieran desinfectar.
- ✓ La superficie debe permanecer visiblemente humedecida durante un mínimo de 30 segundos para asegurar un efecto óptimo.



Actividad

Eficacia	Normativa	Tiempo de contacto
Escherichia coli	EN 13697	30 s
Pseudomonas aeruginosa	EN 13727, EN 13697, EN 14561	30 s
Staphylococcus aureus	EN 13727, EN 13697, EN 14561	30 s
Enterococcus hirae	EN 13727, EN 13697, EN 14561	30 s
Staphylococcus aureus MRSA	EN 13727	30 s
Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)	EN 13727	30 s
Candida albicans	EN 13697, EN 13624, EN 14562	30 s
Aspergillus brasiliensis	EN 13697	180 s
Mycobacterium terrae	EN 14348, EN 14563	30 s
Mycobacterium avium	EN 14348, EN 14563	30 s
Virus con envoltura (HIV, HBV, HCV, Vaccinia)	EN 14476	15 s
Norovirus	EN 14476	15 s
Adenovirus	EN 14476	30 s
Rotavirus	EN 14476	15 s
Poliovirus	EN 14476	120 s

Referencias

Presentación	Ref.	Contenido	Embalaje
Unitaria válvula premontada	156804	1000 ml	8 UI

Novamed[®] Surface es una solución lista para su uso que no deja rastros al secar, no contiene colorantes ni aldehídos y desprende un olor agradable al utilizarlo.