

Novamed® Surface

Desinfectante de superficies

Bimedica.

Solución de base alcohólica de amplio espectro, listo para usar en la desinfección de superficies resistentes al alcohol. Gracias a su alto contenido en alcohol (57gr), nos aseguramos un efecto de acción y secado, rápidos.

Marcado CE según el RD 1591/2009 y la Directiva Europea 93/42/CEE que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en **P.S Clase IIa**.

> Indicaciones

Pulverizar una película uniforme sobre las superficies de los productos sanitarios que se quieran desinfectar.

Las superficie debe permanecer visiblemente humedecida durante un mínimo de 30 segundos para asegurar su eficacia.

> Aplicaciones

Para la desinfección de equipos y superficies clínicas en cualquier Area hospitalaria (UCI, Qx, diálisis, laboratorios ambulancias...): Mesas de operaciones, camillas de examen, sillones para pacientes, sillas de ruedas, equipamiento médico, carros y bandejas.

> Composición

Composición 100 g: Etanol 57g, Isopropanol 6g, Agua purificada y excipientes c.s.p hasta 100g.

> Actividad

Eficacia	Normativa	Tiempo de contacto
Escherichia coli	EN 13697	30 seg
Pseudomonas aeruginosa	EN 13727 / EN 13697	30 seg
Staphylococcus aureus	/ EN 14561	
Enterococcus hirae		
Staphylococcus aureus MRSA	EN 13727	30 seg
Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)	EN 13727	30 seg
Candida albicans	EN 13697 / EN 13624 / EN 14562	30 seg
Aspergillus brasiliensis	EN 13697	3 min
Mycobacterium terrae	EN 14348 / EN 14563	30 seg
Mycobacterium avium	EN 14348 / EN 14563	30 seg
Virus con envoltura (HIV, HBV, HCV, Vaccinia)	EN 14476	15 seg
Norovirus	EN 14476	15 seg
Adenovirus	EN 14476	30 seg
Rotavirus	EN 14476	15 seg
Poliovirus	EN 14476	2 min

> Referencias

Presentación	Ref.	Contenido	Embalaje
Spray	156804	1000 ml	8 UI
Garrafa	161486	5000 ml	3 UI



Novamed® Surface es una solución lista para su uso que no deja rastros al secar, no contiene colorantes ni aldehídos