

Virusolve® + EDS y +EDS RTU Desinfectante de Alto Nivel para instrumental

Desinfectante con poder esporicida muy efectivo y seguro, diseñado para la desinfección de alto nivel de instrumentos médicos, quirúrgicos, dentales y endoscópicos, en tan sólo 5 minutos. La solución es eficaz durante un periodo de 14 días.

Marcado CE según el RD 1591/2009 y la Directiva Europea 93/42/CEE que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en **P.S. Clase IIb**.

> Composición

Bis (3-aminopropil) dodecilamina, cloruro de didecildimetilamonio, surfactantes no iónicos, excipientes y agentes quelantes.

> Respetuoso con el material sanitario

Gracias a su composición, es más suave con los endoscopios flexibles que el ácido peracético.

> Aplicaciones

Adecuado para para desinfectar instrumental médico y quirúrgico.

> Modo de empleo Virusolve® + EDS



Realizar una solución de Virusolve®+ EDS al 2.5% (25 mL/L) con agua. Remojar durante 5 minutos asegurándose de que todos los espacios y huecos están completamente sumergidos con la solución y que no existen bolsas de aire.

> Modo de empleo Virusolve® + EDS RTU

Solución lista para usar Virusolve+ EDS diluido al 2,5%, sin necesidad de activación. Rápida efectividad en 5 minutos.

> Actividad

Eficacia	Normativa	Tiempo de contacto
Esporicida	EN 13704	2 min
	EN 14347	1 min
Micobactericida	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> y <i>terrae</i> : EN 14348	1 min
	<i>Mycobacterium avium</i> y <i>terrae</i> : EN 14563	5 min
Bactericida	EN 1276	1 min
	EN 13727	1 min
	EN 14561	5 min
Viricida	<i>HIV, Hep B y C</i> : EN 14476	1 min
	<i>Poliovirus</i> y <i>Adenovirus</i> : EN 14476	5 min
Fungicida y Levuricida	EN 1275	1 min
	EN 1650	1 min
	EN 13624	5 min
	EN 14562	5 min

> Referencias

Virusolve® + EDS

Contenido	Referencia	Embalaje
1 botella de 125 ml	160025	118 botellas
1 botella de 250 ml	160026	24 botellas
1 botella de 1L	160027	10 botellas
1 garrafa de 5L	160028	4 garrafas

Virusolve® + EDS RTU

Contenido	Referencia	Embalaje
1 garrafa de 5L	160029	4 garrafas

Virusolve® + Tiras de control EDS

Contenido	Referencia	Embalaje
100 tiras	160030	1 caja



Producto biodegradable, anticorrosivo y no tóxico: no contiene componentes peligrosos como cloro, glutaraldehído y otros compuestos aldehídos

Instrucciones de uso: Tiras para el control de la eficacia desinfectante

