

# Novamed® Surface AF Desinfectante de superficies sin alcohol

**Bimedica.**

Desinfectante de superficies. De acción rápida y seca sin dejar residuos. No contiene aldehídos, fragancias ni colorantes, y es adecuado para todas las superficies sensible al alcohol.

**Marcado CE** según el RD 1591/2009 y la Directiva Europea 93/42/CEE que regula los Productos Sanitarios, clasificándolos en **P.S Clase IIb**.

## > Indicaciones

Desinfección de superficies: rociar las superficies con Novamed® Surface AF listo para usar a una distancia de, como mínimo, 30 cm y extender con un paño. Se recomienda este uso para superficies de difícil acceso.

Gracias a su innovador dosificador, permite que el producto se pueda liberar en forma de spray o espuma.

Para conseguir una limpieza y desinfección de las superficies, sólo hay que rociar Novamed Surface AF, en spray o espuma, sobre ellas, a una distancia aproximada de 30 cm y extender con un paño.

## > Aplicaciones

Producto eficaz para la desinfección rápida de superficies como mesas de operaciones, camillas de exploración, camillas, sillones para pacientes, sillas de ruedas, equipos médicos, bandejas, carritos, camas de maternidad y de hospitales.

## > Composición

Composición en 100 g: Cloruro de Didecildimetilamonio (DDAC) 0.45 g., N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 0.45 g. y Agua purificada y excipientes c.s.p hasta 100 g.

## > Actividad

Eficacia	Normativa	Tiempo de contacto
Bactericida incl. MRSA, VRE	EN 13727 / EN 14561 / EN 13697	60 seg
Levuricida	EN 13624 / EN 14562 / EN 13697	60 seg
Virus con envoltura (VIH, HBV, VHC, Vaccinia)	EN 14476	30 seg
Rotavirus y Norovirus	EN 14476	30 seg
Micobactericida	EN 14348	5 min
Aspergillus brasiliensis	EN 13624	10 min
Clostridium difficile	EN 13704	15 min

## > Referencias

Presentación	Ref.	Contenido	Embalaje
Spray	160490	1000 ml	8 UI
Garrafa	160491	5000 ml	3 UI



Viricida en 30 segundos



Libre de alcoholes, aldehídos, fenoles y PHMB